



KN95 เครื่องช่วยหายใจกรองฝุ่นละออง

คุณสมบัติ

ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อความสะอาดสบายยิ่งขึ้น

- วาล์วหายใจออกที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยลดความร้อนและความชื้นที่สะสมภายในหน้ากาก เพื่อเพิ่มความสะอาดสบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในการทำงานที่ยาวนานขึ้น
- โฟมจมูก PU ช่วยลดการรั่วซึมพร้อมให้ความสบายสูงสุด
- ลวดจมูกช่วยให้ผู้ใช้ไม่สามารถพันหมอกครั้นให้กับแว่นตาและแว่นตาได้
- วัสดุกรองชั้นสูง KN95 ให้อัตราการป้องกันอนุภาคสูงถึง 99.5%
- สามารถติดตั้งแว่นตานิรภัย หมวกกันน็อก แวนตา ที่ปิดหู และที่สวมตาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ห้ามใช้ในความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่า 19.5% ของสิ่งแวดล้อม
- หน้ากากนี้ไม่สามารถใช้กับก๊าซพิษและไอน้ำได้

มาตรฐาน

หน้ากากสำหรับใช้งานพลเรือน KN95 คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองโดย China LA (GB2626-2019 KN95)

- ประสิทธิภาพการกรอง
- แรงดันทานการหายใจ
- วาล์วหายใจออก(ถ้ามี)

ตัวกรองอนุภาค KN95 (ระดับประสิทธิภาพการกรอง 95%) มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นละออง PM2.5 และมลพิษในชีวิตประจำวัน อาจมีข้อจำกัดในการใช้ซ้ำ

วัสดุ

วัสดุต่อไปนี้ใช้กับเครื่องช่วยหายใจแบบฝุ่นละอองรุ่น KN95:



	6001-KN95W	6001-KN95B	6002-KN95W	6001-KN95OV	6001-KN95VOV
Head Straps			•		
Ear-loop	•	•		•	•
Nose Foam	•	•	•	•	•
Nose Clip	•	•	•	•	•
Filter Media	•	•	•	•	•
Exhalation Valve					•
Valve Membrane					•
Activated Carbon				•	•
Adjustable Buckle					

*วัสดุปราศจากน้ำยางและไม่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ

การจัดเก็บและการขนส่ง

เครื่องช่วยหายใจแบบฟูลดองซีรีส์ KN95 มีอายุการเก็บรักษา 3 ปี การสิ้นสุดอายุการเก็บรักษาระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ก่อนการใช้งานครั้งแรก ควรตรวจสอบเสมอว่าผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาตามที่ระบุไว้ (ใช้ตามวันที่) ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในสภาพที่สะอาดและแห้งในช่วงอุณหภูมิ: -5°C ถึง +50°C โดยมีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด <75% เมื่อจัดเก็บหรือขนส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมที่ใหม่



ขอบเขตการรับผิดชอบ


การรับประกันแบบจำกัดนี้จัดทำขึ้นแทนการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่มีการรับประกันอื่นใดที่นอกเหนือไปจากคำอธิบายที่ปรากฏในหน้าเอกสารนี้ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายจะเป็นไปตามมาตรฐานทางกายภาพและข้อกำหนดเฉพาะของ Makrite

การเยียวยาเฉพาะ: ความเสียหายจากการละเมิดการรับประกันแบบจำกัดนี้จำกัดอยู่เพียงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Makrite ในจำนวนดังกล่าวซึ่งพิสูจน์แล้วว่าการผลิตอย่างมีข้อบกพร่อง ยกเว้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น Makrite จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดชอบใดๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม บังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่อง ที่เกิดขึ้นจากการขาย การใช้ การใช้ในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้

การจำกัดเวลาในการให้บริการ

- อย่าใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเดียวกันเป็นเวลานานกว่า 8 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะๆ ในสถานที่ทำงานที่สกปรกซึ่งอาจส่งผลให้มีการบรรจุตัวกรองสูง
- ออกจากบริเวณที่ปนเปื้อนและถอดเครื่องช่วยหายใจออก หากหายใจลำบากหรือไม่สามารถใส่ได้พอดี หรือเครื่องช่วยหายใจเสียหาย สกปรก หรือบิดเบี้ยว อย่าใช้เครื่องช่วยหายใจแบบเดิมอีกเมื่อถอดออกแล้ว
- ระยะเวลาการบริการสูงสุดของเครื่องช่วยหายใจนี้คือห้า (5) วันติดต่อกันตามปฏิทิน (รวมวันที่ไม่ได้ใช้งาน) เริ่มตั้งแต่วันที่ใช้งาน

วิธีการสวมใส่

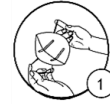

Hold the respirator in your hand as shown, with the left hand holding the left strap and the right holding the right strap.



Place the respirator over the nose, mouth and chin. Pull the left and right strap so that the top of the strap goes above the ear and the bottom of the strap goes below the ear.



Hold the non-removable hook, which you will find attached to the right strap, and hook onto the left strap on the back of the head for a proper fit. There are 3 hook slots to choose depending on your head size.



To test fit:
a) Cup both hands over the mask.
b) Inhale sharply. Negative pressure should be felt inside the mask. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust the mask and hook for a better fit.